




# Technisches Datenblatt

## FFP2 Comfort L

zertifiziert nach EN149:2001+A1:2009, CE2841

<b>Klassifizierung</b>	Zertifiziert nach: CE2841 EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR
<b>Produktbeschreibung</b>	Die FFP2 NR Maske von Protection Impuls ist eine medizinische Atemschutzmaske ohne Ventil. Sie eignet sich für Kliniken, Praxen, Senioren-/Pflegeheime, Schule, Kita, Handwerksbetriebe und allgemein alle Bereiche mit besonderer Vorsicht bzgl. der Hygiene-Vorschriften, beispielsweise auch im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen. Die Halbmaske ist ideal für private und professionelle Zwecke geeignet. Der Nasenbügel ist flexibel anpassbar und somit auch für Brillenträger geeignet. Die klassischen, weißen Atemschutzmasken, passen sich durch ihren ergonomischen Sitz an unterschiedlichste Gesichtsformen an. Die Maske lässt sich problemlos korrekt aufsetzen - und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen.
<b>Material</b>	Vliese: PP (Polypropylen) Ohrschlaufen/Ear loops: PES, EA (Polyester, Elasthan) Nasenbügel/Nose clip: Stahl-Draht in PE-HD (Hart-Polyethylen)
<b>Anlegen der Maske</b>	<p><b>Anlegen der Maske</b></p>  <p>Öffnen Sie die Maske mit dem Nasenclip oben und legen Sie diese über Mund und Nase.</p> <p>Die Kante muss mit dem Nasenclip auf dem Nasenrücken liegen. Richten Sie die Maske aus und drücken Sie den Nasenclip an Ihren Nasenrücken.</p> <p>Legen Sie die Ohrbänder auf beiden Seiten über die Ohren.</p> <p>Prüfen Sie die Dichtigkeit der Maske.</p>
<b>Sitz der Maske</b>	Drücken Sie den Nasenclip fest an die Nase, so dass ein dichter Sitz gewährleistet ist. Prüfen Sie den Dichtsitz der Maske durch einen Atemtest. Hierbei muss die Maske beim Einatmen merklich an das Gesicht gesaugt werden. Falls Luft um die Nase herum in die Maske eintritt, korrigieren Sie den Sitz mit Hilfe des Nasenclips. Sollte der Sitz der Maske allgemein zu lose sein, verdrehen Sie die Ohrbänder jeweils um 180° in Form einer Acht.
<b>Anwendungsdauer</b>	Die Maske ist für die Benutzungsdauer einer Arbeitsschicht (ca. 8 Std.) bei normaler Beanspruchung vorgesehen. Die Maske ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet.
<b>Entsorgung</b>	Um die Risiken potenzieller Infektionsgefahren zu minimieren, befolgen Sie bitte die Entsorgungsverfahren gemäß den geltenden und örtlichen Gesetzen, Vorschriften, Bestimmungen und Normen zur Infektionsprävention.